

Veled fejlődik

Életkortól függetlenül, otthon, vagy akár út közben,
a PARIchamber az ideális szelepes spacer
bármely beteg számára

Főbb jellemzők

- Antisztatikus, szelepes spacer meghatározott mennyiségű megbízható gyógyszerbevételhez
- Szemmel könnyen ellenőrizhető áttetsző szájrész, alacsony ellenállású kilégző szeleppel
- Univerzális MDI adapter
- Fertőtleníthető forrásban lévő vízben, vagy gőzfertőtlenítőben
- SmartTouch® maszkok a sokrétű felhasználáshoz



0-2 éves korig Bébi maszkkal	2 éves kor felett Gyermek maszkkal	4 éves kor felett Csutorás

Specialists in effective inhalation **PARI**

www.eo.hu

PARI chamber

ANTISTATIC

használata

Breki bemutatja a használatot Katicának

1



Először vedd le az inhaler spray kupakját.
Breki sohasem felejt el felrázni a sprayt használat előtt.

2




Ezt követően dugd a sprayt a PARIchamber zöld csatlakozógyűrűjébe.
Ha használasz maszkot, csatlakoztasd azt a csutorához.

3a



Tedd a maszkot az arcodhoz úgy, hogy a maszk teljesen körbe zárja az orrod, és a szád.

3b

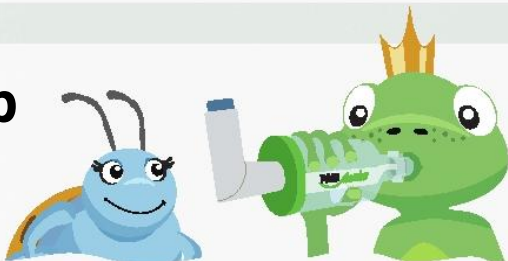

Mikor idősebb leszel Katica, nem lesz szükséged már a maszkra.
Ekkor meg kell majd győződnöd róla, hogy a szájrész a fogaid között van, és az ajkad teljesen körülzárja azt.

4



Most megnyomhatod a sprayt egyszer az ujjaddal.
Lélegezz lassan, és mélyen.

5



Ha az orvos előírt kettő, vagy több dózist írt elő, akkor ismételd meg a 3. és 4. lépést.

Ne felejtse!

Ha 18 hónaposnál fiatalabb vagy, 4-6 belégzést végezz. Ha ennél idősebb vagy, 2-4 belégzés elegendő.

Amint végeztél, tisztítsd meg a PARIchamber-t.

1 Válaszd le a csatlakozógyűrűt és a maszkot, ha rajta van.

Tisztítás:

2 Tisztíts meg minden részt gyengéden meleg csapvízben egy kis mosogatószerrel. Öblítsd le tiszta vízzel.



Fertőtlenítés:

3 A PARIchamber a maszkot is beleértve fertőtleníthető gőzfertőtlenítőben.



4 Alternatívaként, tedd be minden részét forrásban lévő vízbe, és 5 percen keresztül hagyd benne. Biztosan legyen elmerülve minden egyes része.



Szárítás:

5 Hagyd megszáradni szoba hőmérsékleten, vagy töröld szárazra egy tiszta konyharuhával.



6 Száraz, pormentes helyen tárold.

